



**La mejor  
elección en  
aparatología  
estética**

CATÁLOGO GENERAL

**RÖS'S**  
Tecnología estética



### **Expertos en tecnología estética desde 1978**

RÖS'S es la marca fabricante de aparatología electro-estética para tratamientos corporales y faciales. Una larga trayectoria en investigación, desarrollo y fabricación de nuevas tecnologías aplicadas a la belleza y el bienestar nos avala.

Desde su fundación, de la mano de Carlos Moliner, Vicenç Gil y Francesc Esteve, RÖS'S ha mantenido vivo su compromiso: dar un servicio integral y aportar soluciones tecnológicas eficaces en el sector de la estética profesional. Hoy, la compañía está consolidada como un referente en innovación en aplicaciones para los sectores de la estética y el wellness.

La inquietud de nuestro equipo de profesionales, formado por esteticistas, ingenieros, fisioterapeutas y médicos estéticos es buscar nuevas técnicas eficientes y seguras para ofrecer las soluciones adecuadas a cada negocio.

Gracias a nuestra orientación internacional, damos servicio en más de 30 países de todo el mundo. Para todos nuestros clientes presentes y futuros, ponemos a su disposición nuestras instalaciones con más de 5.500m<sup>2</sup> dedicados a la investigación, diseño, producción, asesoramiento y formación en los últimos avances tecnológicos.





## Nuestros valores, nuestra compañía

### **Excelencia en la fabricación**

Como empresa certificada por ISO como "Diseñadores, fabricantes y proveedores de equipos electro-médicos y electro-estéticos", ponemos especial atención en los protocolos de calidad durante el proceso de desarrollo y fabricación, cumpliendo con la norma internacional ISO 9001:2008.

### **Pasión por la innovación**

RÖS'S apuesta por nuevas combinaciones de energía y aplicaciones más intuitivas para optimizar los resultados. Nuestra continua inquietud es investigar buscando nuevas soluciones tan sencillas, como sorprendentes.

### **Siempre cerca del profesional**

Nuestro equipo trabaja con vocación de servicio y cercanía para asesorar en todo momento en la toma de decisiones. Compartir nuestro conocimiento y formar a los profesionales son la gran apuesta de futuro de la compañía. Acompañamos a nuestros clientes, día a día, en su crecimiento. Para ello ponemos a su disposición nuestro teléfono de atención al cliente **(34) 934 266 017** y nuestro buzón: [atencion.clientes@ross.es](mailto:atencion.clientes@ross.es)

### **Belleza y bienestar**

Es nuestra responsabilidad trabajar con rigor, priorizando en todo momento la seguridad de todos nuestros tratamientos. Por ello, apostamos por una línea tecnológica controlada por ingenieros titulados y por unos protocolos de aplicación no invasivos y desarrollados bajo control médico.

**Un mundo de  
posibilidades  
en tecnología  
estética**



RÖS'S ha centrado su modelo de desarrollo en la creación de una gama de producto de diseño con líneas equilibradas, resistente en cabina, inteligente en el control de la energía y eficaz en sus tratamientos.

El éxito de las soluciones tecnológicas RÖS'S reside tanto en el reconocimiento y la adaptación a los cambios de las tendencias, como en el desarrollo de modelos que aporten innovaciones. Nuestro compromiso es el desarrollo de un producto fiable, innovador, único en su método, efectivo con sus tratamientos y confortable para el profesional.

Toda la gama de producto aspira a cumplir con las especificaciones básicas que lo conviertan en un producto fiable y exclusivo para nuestro cliente.

- 1. FABRICACIÓN UE**
- 2. EXCLUSIVIDAD TECNOLÓGICA Y MODOS DE APLICACIÓN INNOVADORES**
- 3. ESTABILIDAD TÉCNICA**
- 4. RESULTADOS COMPROBADOS Y DOCUMENTADOS**

Escoger profesionalidad y servicio es apostar por la diferenciación y el éxito.



INNOVACIÓN  
SOSTENIBLE



APOYO A PYMES Y  
AUTÓNOMOS



COMPROMISO DE  
CUMPLIMIENTO DE LA  
LEGISLACIÓN VIGENTE



APOYO A LA MUJER  
EMPREDEDORA



COMPROMISO CON  
LA FORMACIÓN  
CONTINUADA

**RÖS'S**  
Tecnología estética

La mejor elección  
en aparatología  
estética

**TRATAMIENTOS  
CORPORALES**

ROLLACTION  
PRESS G3  
TEI SYSTEM  
KESTOS T2  
US1

**TRATAMIENTOS  
FACIALES Y  
CORPORALES**

BINARY PREMIUM  
TERMOBEAUTY  
MESOBIOLIFT RF  
MY SEKRET


**TRATAMIENTOS  
FACIALES**

COMPLET

**DEPILACIÓN**

DEPILPLUS 13MHZ  
DEPILPLUS 3  
DIODO 2000/5

ULTRASONIDOS  
TERMO-ESTIMULACIÓN  
MASAJE FISIOLACTIVO  
PRESOTERAPIA  
TRATAMIENTOS FACIALES  
DIATERMIA  
MESOTERAPIA  
RADIOFRECUENCIA  
ELECTRO-ESTIMULACIÓN  
DEPILACIÓN

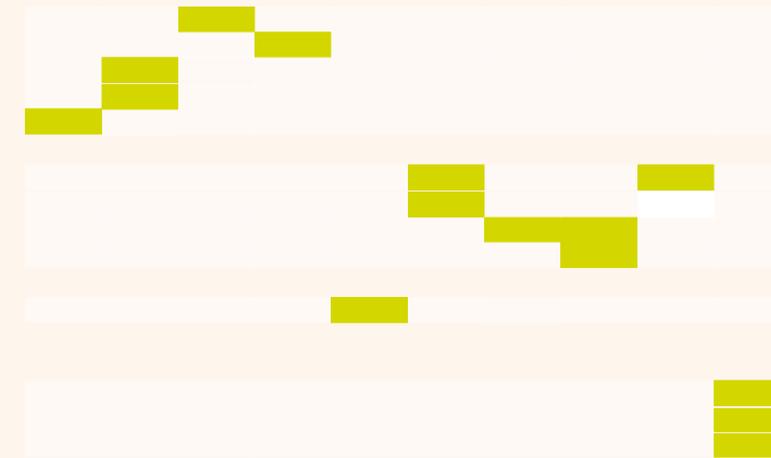



roll Action  
system



## SISTEMA DE MASAJE FISIO-ACTIVO 100% NATURAL

**Rollaction System** es el revolucionario y exclusivo sistema de masaje corporal fisio-activo inspirado en los movimientos profesionales del masajista. Potenciando el trabajo de las manos expertas, **Rollaction** aporta fuerza y energía en los tratamientos corporales más demandados, aumentando la eficacia con el mínimo esfuerzo.

Cuidado manual y tecnología se alían proporcionando una herramienta versátil con resultados probados.

El sistema Rollaction reactiva el metabolismo de manera no invasiva, respetando la naturaleza del sistema vascular, muscular y dérmico. Devuelve al organismo el equilibrio y la armonía.

### ¿Cómo actúa Rollaction?

**Rollaction** funciona mediante una rotación secuenciada de alta penetración de sus cabezales-roll. Esta rotación provoca una fricción en forma de amasamiento sobre la piel y los tejidos que, combinado con la presión, simula el efecto de las manos del profesional maximizando su efecto. Así mismo, el mando de control proyecta luz infrarroja activadora para mejorar los resultados.


TRATAMIENTOS CORPORALES

## Rollaction

### TRATAMIENTOS

- ANTICELULÍTICO
- REMODELANTE
- TONIFICANTE
- ACTIVADOR CIRCULATORIO
- REDUCTOR
- DESCONTRACTURANTE
- MASAJE DEPORTIVO



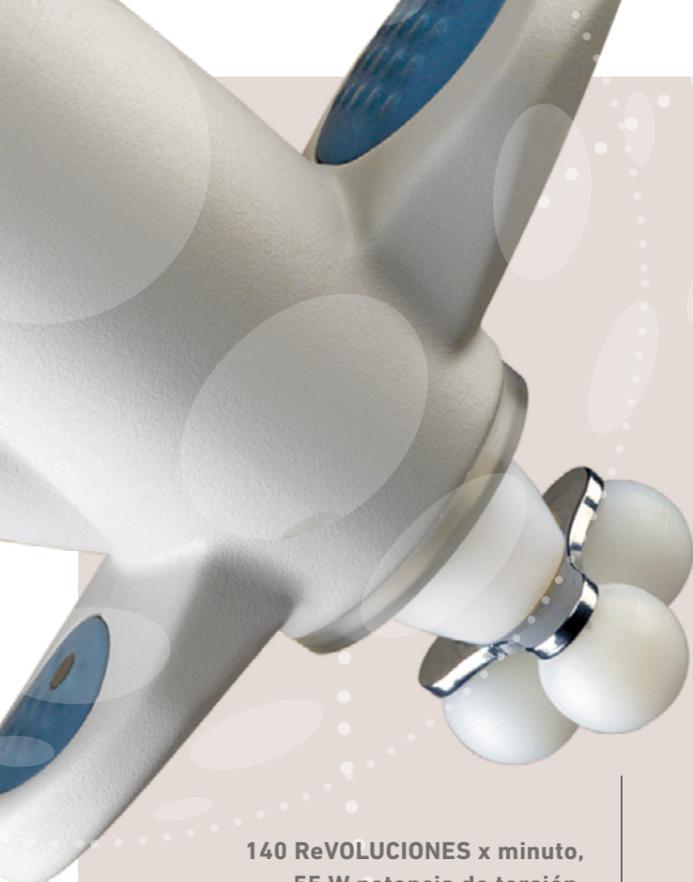

140 ReVOLUCIONES x minuto,  
55 W potencia de torsión,  
6 velocidades y  
sensores de seguridad

El aliado perfecto  
para el  
quiromasajista

- 1 **Piel firme:** A diferencia de otros sistemas, **Rollaction** trabaja la celulitis enquistada a nivel profundo eliminando la antiestética piel de naranja.
  - 2 **Remodelación:** El trabajo rotatorio disuelve los acúmulos grasos facilitando su drenaje mediante canales linfáticos. Recuperar las formas anatómicas es una realidad con **Rollaction**.
  - 3 **Tonificación:** La compresión de los capilares que alimentan a los tejidos, impide la correcta irrigación de la zona. Mediante el masaje fisio-activo profundo el aporte extra de oxígeno y nutrientes alimenta y recupera las fibras musculares.
  - 4 **Sistema vascular:** Gracias al estímulo mecánico, activamos las fibras musculares de las paredes de los vasos sanguíneos. La mejora en el sistema circulatorio gracias al aumento de la irrigación sanguínea incrementa la actividad metabólica.
  - 5 **Tono muscular:** Todos nuestros tejidos (muscular, óseo, conjuntivo, etc.) necesitan de una correcta irrigación sanguínea. Las posturas incorrectas, el sedentarismo, las lesiones musculares... dañan nuestra musculatura, obstruyendo las vías de llegada de oxígeno y provocando desequilibrios importantes del aparato locomotor, e incluso disfunciones orgánicas.
- Rollaction** trabaja zonas musculares completas y, gracias a su movimiento de rotación y presión progresiva, reestablece la circulación y el impulso nervioso en las zonas afectadas.



# Rollaction

## STUDY 1 ROLL ACTION

RÖS'S ha realizado un estudio de resultados con una muestra de 50 mujeres con problemas estéticos (sobrepeso, piel de naranja e inflamación) causados por deficiencias circulatorias o malos hábitos.

Reducción media de volumen en cm				
Cintura	Caderas	Glúteos	Muslos	Rodillas
8,16	8,58	6,82	5,44	1,3

Se observa una reducción de volumen de hasta tres tallas con disminución de hasta 12cm en cintura y caderas.

La textura de la piel mejora notablemente gracias a la reafirmación de tejidos.

### TRIPLE ACCIÓN ROLLACTION

| **Acción vascular y linfática:** aumento del riego arterial y de la evacuación venosa y linfática

| **Acción dérmica:** descongestión de los vasos y aumento de irrigación en todos los tejidos


| **Acción muscular:** multiplica el aporte de nutrientes y oxígeno, tonificando sus fibras y eliminando contracturas



### SUCCIÓN


Los sistemas tradicionales funcionan pinzando o succionando la piel, provocando una tracción mecánica directa sobre tejidos superficiales, sin alcanzar las capas profundas.

Existe, por tanto, un riesgo de provocar flacidez.

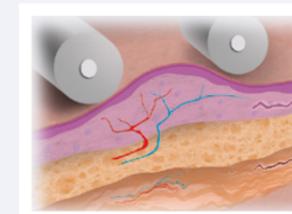

### COMPRESIÓN

Rollaction trabaja todos los tejidos profundos sin forzar tracción alguna, sino una compresión regular y controlada sobre todos los tejidos desde la piel hasta la musculatura profunda.

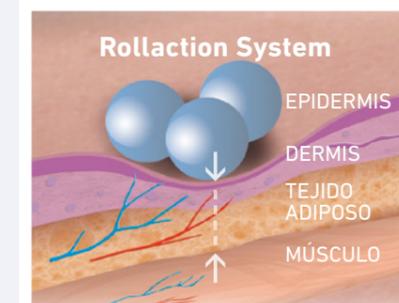

### Dos niveles de penetración Máxima eficacia

#### A NIVEL DÉRMICO

- | Programa anticelulítico
- | Programa reductor
- | Programa tonificante-remodelante
- | Programa activador circulatorio

#### A NIVEL MUSCULAR

- | Programa descontracturante
- | Programa de masaje deportivo



## Press G3

### PRESOTERAPIA, EL GRAN ALIADO DE LA BELLEZA Y EL BIENESTAR

La presoterapia es una técnica clásica en el sector profesional de la belleza y la medicina estética. Gracias a su probada eficacia, el masaje drenante se ha convertido en uno de los tratamientos más demandados. Drenaje linfático, activación circulatoria y relajación son algunos de sus beneficios.

RÖS'S ha elaborado 9 programas preestablecidos, 6 para las extremidades inferiores y 3 para las extremidades superiores. 9 programas libres para personalización.

#### ¿Cómo actúa Press G3?

Los malos hábitos y el ritmo de vida actual, conllevan consigo trastornos físicos, nerviosos y de ansiedad. La presoterapia es un sistema de masaje neumático por compresión y descompresión controlada, que previene la aparición de alteraciones circulatorias y mejora el estado de relajación. Efectividad probada médicamente.

#### Aplicación y beneficios

- | Estimulación de la circulación de retorno.
- | Previene la aparición de varicosidades.
- | Ideal para cuidados post-parto.
- | Desintoxicación después de intervenciones quirúrgicas (con prescripción médica).
- | Previene la aparición de celulitis.

#### Características generales

- | Cámaras de aire superpuestas para un mejor drenaje.
- | Panel de control de secuencia del tratamiento.
- | Regulador de intensidad y tiempo de presión individualizado por secciones.
- | Test de presión inteligente.
- | Finalización de tratamientos por ciclo o por tiempo.



#### PROGRAMAS EN EXTREMIDADES INFERIORES:

- DRENANTE PIERNAS
- ACTIVADOR PIERNAS
- PIEL DE NARANJA
- POST ADELGAZAMIENTO
- PIERNAS CANSADAS
- MICROACTIVADOR

#### PROGRAMAS EN EXTREMIDADES SUPERIORES:

- POST MASTECTOMÍA (PRESCRIPCIÓN MÉDICA REQUERIDA)
- ACTIVADOR BRAZOS
- DRENANTE BRAZOS






## TERMO-ESTIMULACIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN

**TEI System** es el equipo de bandas emisoras de infrarrojos y corrientes variables para el tratamiento conjunto de termoterapia y electroestimulación muscular.

**RÖS'S** fue pionero en el desarrollo de la termo-estimulación. Gracias a la continua investigación, su equipo de ingenieros ha diseñado las bandas de aplicación de última generación más sofisticadas para ofrecer al cliente óptimos resultados y máxima seguridad.

### El placer de la tecnología Pérdida de volumen en cuatro sesiones

El dominio de dos agentes básicos en estética profesional: **calor y estimulación** son la clave de **TEI System**. Gracias a un calor infrarrojo profundo, las células adiposas que conforman el tejido graso se calientan favoreciendo así el efecto de la corriente eléctrica a la hora de licuarlas. La emisión controlada de calor combinada con los diferentes tipos de corriente eléctrica garantiza el resultado.

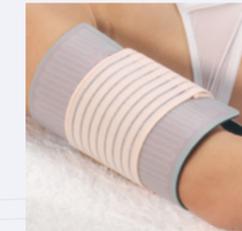

Bandas altamente adaptables



18 electro-corrientes combinadas en  
21 programas corporales

## TRATAMIENTOS CORPORALES

# TEI System

### TRATAMIENTOS

- CELULITIS BLANDA
- CELULITIS DURA
- CELULITIS EDEMATOSA
- REAFIRMACIÓN
- REAFIRMACIÓN INTENSA
- POST-PARTO
- SOBREPESO
- SOBREPESO LOCALIZADO
- CIRCULATORIO
- DRENANTE
- REDUCTOR
- REMODELANTE
- TONIFICANTE
- RELAJANTE
- TENS
- LIPOLÍTICO
- GIMNASIA PASIVA
- SENOIDAL CALMANTE
- POTENCIACIÓN SECUENCIAL
- LIPO-DRENANTE
- TRONCO SUPERIOR





Abdomen, Muslos, Gemelos y Pies

Glúteos, Flancos y Muslos posterior

### SISTEMA DE TRATAMIENTO INTEGRAL

Acción global para un resultado profesional y equilibrado

## TRATAMIENTOS CORPORALES TEI System

### Ventajas de trabajar en sinergia

- | La sensibilidad ante la electro-estimulación es más agradable gracias a la sensación de sedación que proporciona el calor
- | Los tiempos de aplicación son más cortos
- | Aumento de la conductividad eléctrica derivada del proceso de sudación
- | A los beneficios del calor estático, se suman los del calor dinámico

### Bandas de última generación


El secreto de la termo-estimulación son sus bandas de fácil aplicación. Flexibles, adaptables, resistentes y seguras.

Su circuito laminar proporciona una emisión de infrarrojos totalmente uniforme y su cobertura flexible se adapta al cuerpo proporcionando un contacto total y perfecto.

Con **TEI System** se incluyen 12 bandas de cuatro tamaños diferentes, además de un Kit de Cortesía para cubrir cualquier incidencia.

### Beneficios derivados del Sistema TEI

- | Efecto lipolítico por penetración del calor infrarrojo de 1 a 3,5 cm
- | Estímulo circulatorio sanguíneo y linfático
- | Aumento de la actividad metabólica
- | Mejora del sistema vascular y de retorno
- | Incremento del tropismo celular, capacidad de cicatrización y elasticidad del tejido conjuntivo
- | Relajación muscular
- | Reafirmación muscular en todos los tratamientos

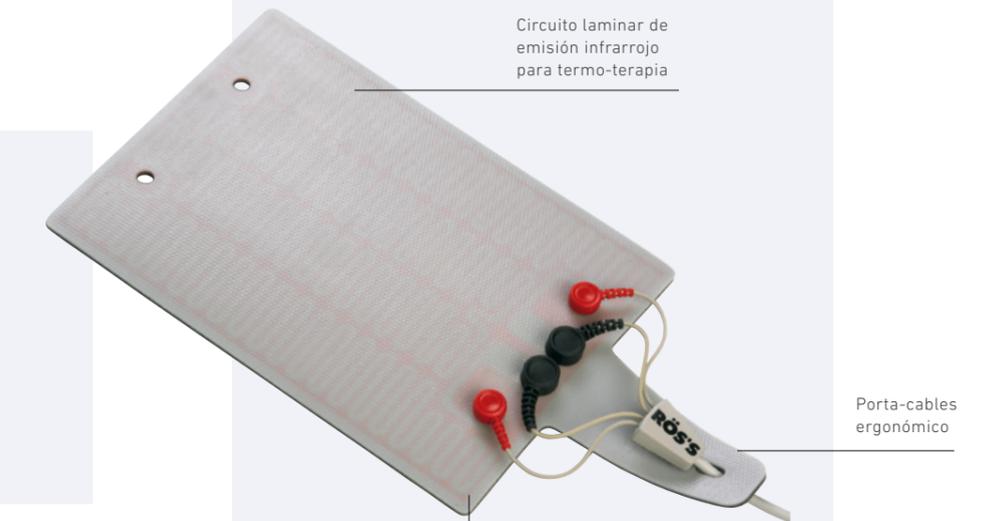

Circuito laminar de emisión infrarrojo para termo-terapia


Porta-cables ergonómico

Fácil aplicación de gel conductor



Bandas de emisión de corrientes pensadas para envolver todo el grupo muscular

Recubrimiento de silicona. Muy flexible y biocompatible para evitar reacciones alérgicas

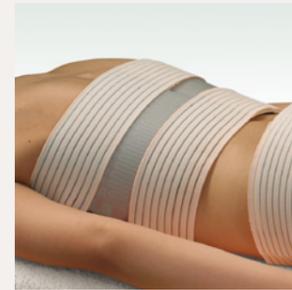

Las bandas de termo-estimulación se adaptan a cada persona y trabajan todo el grupo muscular

## TERMO-ESTIMULACIÓN, DOS TRATAMIENTOS EN UNO

La acción conjunta de la termoterapia por infrarrojos y la electroestimulación permite realizar simultáneamente dos tratamientos en uno. Esta técnica, creación de RÖS'S, ofrece resultados probados en un tiempo récord.


La termo-estimulación es uno de los tratamientos estrella en estética profesional. **Kestos T2** te proporciona una libertad única, ya que sus bandas trabajan de manera autónoma para que disfrutes de tu tiempo.

### ¿Cómo actúa Kestos T2?

El calor infrarrojo penetra hasta el tejido adiposo creando un efecto de termolipólisis. Esta acción se ve reforzada por el efecto percusor de las corrientes, favoreciendo su ruptura y facilitando su drenaje, sin renunciar a la reafirmación de los tejidos.

La termo-estimulación es un método de trabajo que aprovecha lo mejor del calor y de la electro-estimulación. Ambas técnicas ven potenciados sus efectos:

- | El calor genera una sedación que hace aún más agradable la electroestimulación, a la vez que favorece la ruptura del nódulo celulítico.
- | La estimulación reafirma los tejidos evitando flacidez en tratamientos de pérdida de volumen o anti-celulíticos.

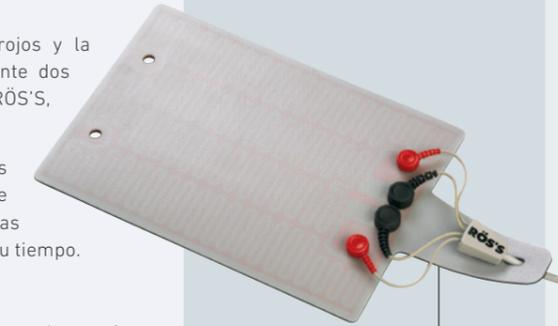

Bandas de última generación flexibles, resistentes y fáciles de limpiar

# Kestos T2

### TRATAMIENTOS

- CELULITIS BLANDA
- CELULITIS DURA
- CELULITIS EDEMATOSA
- REAFIRMANTE
- REAFIRMANTE INTENSO
- POST PARTO
- SOBREPESO
- SOBREPESO LOCALIZADO
- CIRCULATORIO
- DRENANTE
- REDUCTOR
- REMODELANTE
- TONIFICANTE
- RELAJANTE ANTIÁLGICO

16 tipos de corrientes combinadas en 14 programas



### Tecnología anticelulítica acción intensa

Llamamos "ultrasonidos" a la técnica estética que consiste en la transmisión de una vibración mecánica a través de los tejidos a una frecuencia muy elevada (en el caso de 1MHz, a 1 millón de veces por segundo). Esta frecuencia es óptima para incidir sobre el tejido graso. Efectos de los ultrasonidos de 1MHz:

- | **Vasodilatación y aumento en la permeabilidad de la piel, lo que facilita la penetración o sonoforesis de principios activos.**
- | **Restablecimiento de la microcirculación local e incremento del drenaje linfático.**
- | **Descompactado de la celulitis.**
- | **Efecto antiinflamatorio.**

## US1, APLICACIÓN DE ULTRASONIDOS A DOS MANOS

RÖS'S ha diseñado **US1**, el equipo de ultrasonidos específico para tratamientos corporales anticelulíticos, reductores y drenantes. Su frecuencia de emisión a 1MHz tiene una capacidad de penetración de entre 4-5cm, siendo así un poderoso aliado para tratar alteraciones corporales como el exceso de volumen o la antiestética celulitis.

### La acción de US1 tiene tres efectos actuando en sinergia

- | **Acción térmica:** el incremento localizado de la temperatura tisular activa los procesos metabólicos que derivan en un aporte extra de vitalidad en los tejidos.
- | **Acción mecánica:** el efecto mecánico de "percusión" descompacta el tejido adiposo.
- | **Sonoforesis:** Sistema muy eficaz para el transporte transdérmico de principios activos sin necesidad de que éstos sean ionizables.

### Parámetros regulables para personalizar el tratamiento según alteración:

- | Tiempo de emisión.
- | Tres niveles de potencia.
- | Emisión continua o pulsada. Tres modos de emisión pulsada.

### TRATAMIENTOS

- REMODELACIÓN CORPORAL
- REDUCCIÓN Y PREVENCIÓN DE PIEL DE NARANJA
- MEJORA CIRCULATORIA
- ELIMINACIÓN NATURAL DE LÍQUIDOS RETENIDOS
- MEJORA GENERALIZADA DEL ASPECTO DE LA PIEL



Las sondas de ultrasonidos de 60mm de diámetro permiten trabajar zonas amplias a dos manos de un modo más rápido y más cómodo.



# Binary Premium

## SOLUCIONES ESTÉTICAS MÁS ALLÁ DE LA DIATERMIA

**Binary Premium** es el equipo multifuncional para tratamientos faciales y corporales basado en la sinergia y complementariedad de la **diatermia y la electro-estimulación**.

### DIATERMIA

**Binary Premium** emite en una frecuencia de **448 kHz** combinando las aplicaciones capacitiva y resistiva. Su acción re-equilibra el potencial eléctrico-celular en todos los tejidos desencadenando cambios biológicos en el organismo a nivel bioquímico. Los efectos de vasodilatación arterial potencian la permeabilidad de la membrana celular, aumentan la oxigenación y la nutrición e incrementan el drenaje venoso, lo que implica una disminución de edema en procesos inflamatorios. Como consecuencia, se pone en marcha una regeneración tisular profunda, incrementando la activación de la neocolagénesis y la recuperación en dermis, músculo, cartílago y hueso.

### ELECTRO-ESTIMULACIÓN

La aplicación de corrientes específicas de electro-estimulación actúa a nivel circulatorio, metabólico, trófico y muscular con el objetivo de completar la acción de la diatermia en tratamientos reafirmantes o reductores.

**Binary Premium** incorpora tres emisiones de electro-estimulación: electrolifting, corriente electro-lipolítica y corriente electro-reafirmante.



#### PROGRAMAS PREDEFINIDOS FACIALES

- REAFIRMANTE
- REVITALIZANTE
- INTENSIVO SUPERIOR
- INTENSIVO MEDIO
- INTENSIVO INFERIOR

#### CORPORALES

- ANTICELULÍTICO
- REDUCTOR
- REAFIRMANTE

#### PROGRAMACIÓN LIBRE FACIAL

- DESVITALIZACIÓN CUTÁNEA
- BOLSAS EN OJOS
- DOBLE MENTÓN
- ACLARAMIENTO DE MANCHAS
- LÍNEAS ORBICULAR OJOS
- CUPEROSIS
- ROSÁCEA
- ACNÉ
- RECUPERA ÓVALO FACIAL
- REGULACIÓN SEBORREICA

#### PROGRAMACIÓN LIBRE CORPORAL

- DRENAJE LINFÁTICO
- SENOS
- ESTRÍAS
- ONTRACTURAS MUSCULARES
- RECUPERACIÓN DE CICATRICES
- POST-CIRUGÍA CORPORAL

### MÉTODO BINARY

El **Método Binary** combina la técnica de la diatermia capacitiva y resistiva con la electro-estimulación. La **diatermia** tiene la capacidad de reequilibrar el metabolismo celular reestableciendo sus funciones, lo que la hace óptima para activar la regeneración de tejidos. Las corrientes específicas de electroestimulación trabajan sobre el tono muscular o sobre la adiposidad.

La acción combinada de ambas técnicas proporciona soluciones eficaces y duraderas para nuestros clientes. El **Método Binary Premium** consta de tres fases. La acción de cada fase apoya los beneficios de la siguiente, dando lugar a un resultado sumatorio.

1

#### BIOESTIMULACIÓN CAPACITIVA

ACCIÓN PREPARATORIA Y ACCIÓN REGENERATIVA EN DERMIS Y MÚSCULO. SE APLICA CON TIEMPOS MÁS EXTENSOS EN TRATAMIENTOS DE REAFIRMACIÓN DÉRMICA.

2

#### BIOESTIMULACIÓN RESISTIVA

ACCIÓN INTENSA SOBRE GRASA Y TEJIDOS DENSOS. SE ASIGNAN TIEMPOS MÁS EXTENSOS EN TRATAMIENTOS REVITALIZANTES, ANTICELULÍTICOS O REDUCTORES.

3

#### ELECTRO-ESTIMULACIÓN

ACCIÓN TONIFICANTE, DRENANTE O LIPOLÍTICA. COMPLEMENTA A LA DIATERMIA.

**Binary**  
PREMIUM  
REGENERACIÓN DE TEJIDOS  
Y TONIFICACIÓN MUSCULAR



## Diatermia

### I Aplicación CAPACITIVA

En la aplicación de diatermia mediante electrodos capacitivos (recubiertos de una envoltura aislante) la energía se transmite como corriente de desplazamiento. Las moléculas de los tejidos, fundamentalmente el agua, vibran y cambian de orientación a la misma frecuencia que la corriente a la que se ven sometidas. Por tanto, las estructuras más afectadas son las más vascularizadas o con mayor contenido en agua: **dermis y musculo.**



### I Aplicación RESISTIVA

En la aplicación de diatermia mediante electrodos resistivos (en contacto directo con la piel) la energía se desplaza como corriente de conducción. Esto provoca un aumento interno e intenso de temperatura que será mayor en aquellas estructuras que oponen una mayor resistencia al paso de la corriente eléctrica: **grasa, tejidos densos y fibróticos.**

Las bandas de electro-estimulación se aplican sobre todo el grupo muscular adaptándose a cualquier zona corporal.




## Electro-estimulación

### I ELECTROLIFTING FACIAL

Combinación de micro-corrientes específicas que estimulan las microestructuras a nivel dérmico y muscular.

- Activación de la microcirculación y del metabolismo general con efecto revitalizante para los tejidos.
- Normalización del tono muscular.

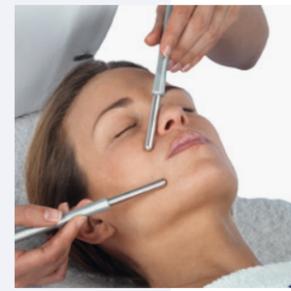

### I ELECTRO-LIPÓLISIS

Corrientes específicas de baja frecuencia que actúan sobre los adipocitos y los lípidos almacenados en ellos desencadenando su destrucción, al tiempo que activa el sistema circulatorio para facilitar la eliminación del contenido graso.

**Las bandas de electro-estimulación manos-libres sincronizan ambos procesos: la degradación de la grasa y su drenaje.**



### I ELECTRO-REAFIRMACIÓN

Corrientes excitomotrices capaces de provocar contracciones musculares, lo que las hace óptimas en tratamientos de rehabilitación y recuperación muscular, así como en tratamientos de reafirmación en tejidos que han perdido el tono.

## TRATAMIENTOS FACIALES & CORPORALES

# Binary Premium

Los electrodos-puntero son precisos en cada maniobra.



Mango acodado Capacitivo + 3 electrodos



Mango acodado Resistivo + 3 electrodos

## Kits ampliación

### Kit suelo pélvico

Kit de ampliación para profesionales de la fisioterapia especializados en suelo pélvico.



### Brazaletes resistivos manos libres

Máxima libertad de movimientos para el profesional quiromasajista o para el fisioterapeuta.



### Doble brazaletes para tratamientos sistémicos

Nuevos tratamientos sistémicos en los que tanto paciente como profesional disfrutan de libertad en sus movimientos.



### Electrodo cóncavo

Adaptabilidad y eficacia en zonas con presencia de tejido óseo, como pómulos, mentón, tobillo, rodilla, etc.



Adaptabilidad máxima

Conectores universales que permiten el uso de electrodos individuales



# B TERMOBeauty

Belleza  
natural

## TERMOBeauty

### TERMOBEAUTY ES DIATERMIA 448kHz

Todo inestetismo o patología se traduce en una alteración del potencial eléctrico celular. Las consecuencias que se desencadenan de ello afectan a nuestra morfología de manera muy diversa, por lo que necesitamos una energía precisa que active o decelere el pulso celular. Esta acción global reequilibradora y regenerativa recupera los tejidos dañados del organismo de manera progresiva. Se trata de ciencia aplicada a la regeneración y a la recuperación.

La señal de emisión de alta frecuencia de 448 kHz es la más adecuada y con aval científico para conseguir la movilización iónica intercelular y la acción desde el corazón de la célula. Sus modos de aplicación, monopolar capacitivo y monopolar resistivo, nos permiten alcanzar todos los tejidos, desde dermis hasta el tejido óseo.

#### Tratamientos generales


Electrodo redondo



Tratamientos manos libres

Tratamientos de precisión  
Electrodo cóncavo

FASE 1	<b>Bioestimulación capacitiva</b>	Acción más específica en dermis y músculo. <b>La inducción a la hipertermia local activa la generación de colágeno y elastina.</b>
FASE 2	<b>Bioestimulación resistiva</b>	Acción más específica en tejidos densos, grasos y fibróticos. <b>Óptimo para tratamientos de recuperación o reducción de tejido adiposo.</b>

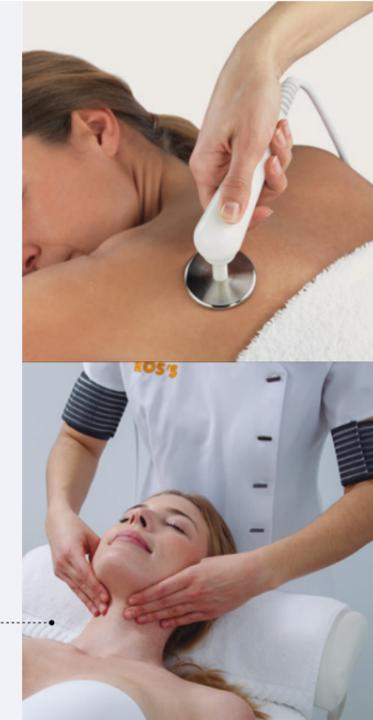

#### TRATAMIENTOS FACIALES

- BOLSAS DE OJOS
- DOBLE MENTÓN
- CUPEROSIS
- ROSÁCEA
- REGULACIÓN SEBORREICA

#### TRATAMIENTOS CORPORALES

- REAFIRMACIÓN SENOS
- ESTRÍAS EN FORMACIÓN
- RECUPERACIÓN DE CICATRICES
- LAXITUD ACENTUADA (ABDOMEN, BRAZOS)
- QUELOIDES
- RECUPERACIÓN DE BIENESTAR
- TRATAMIENTO CAPILAR





## TECNOLOGÍA BIO-REPARADORA PARA LA REAFIRMACIÓN CUTÁNEA Y LA DESCONGESTIÓN DE TEJIDOS

Hasta ahora los tratamientos dérmicos se programaban por fases, primero estimulando una vasodilatación y posteriormente penetrando nutrientes hasta el interior de la piel.

Con Mesobiolift RF, logramos ambos objetivos en el mismo momento. Este nuevo sistema actúa de manera sincronizada desde la superficie y desde el interior de la piel, con el fin de accionar los mecanismos que potencian la regeneración celular.

### ¿Cómo actúa Mesobiolift RF?

La emisión endo-térmica generada por Mesobiolift RF resulta de la fusión de energía electromagnética y corriente continua. Esta nueva onda posee el poder de producir calor interno controlado y de portar transdérmicamente principios activos en el interior de la piel.

#### Protocolo profesional

<b>FASE I</b>	Barrido de 1MHz a 3MHz	<b>Preparador cutáneo</b>	Controla el aumento progresivo de temperatura en la piel. Mantiene estimuladas y receptoras todas las capas cutáneas
<b>FASE II</b>	Señal endo-térmica	<b>Activador celular</b>	Tratamiento en sinergia de RF e introducción de principios activos
<b>FASE III</b>	Radiofrecuencia	<b>Potenciador de eficacia</b>	Activador circulatorio para potenciar el aprovechamiento de principios activos

**Emisión coaxial**, no requiere de incómodos electrodos de retorno



**Emisión bipolar resistiva**, emisión controlada y selectiva de energía

**Diseño ergonómico.** Disparo de energía por pedal para manipular el aplicador libremente

## Mesobiolift RF



#### TRATAMIENTOS

- ANTICELULÍTICO
- REMODELANTE
- TONIFICANTE
- ACTIVADOR CIRCULATORIO
- REDUCTOR
- DESCONTRACTURANTE
- MASAJE DEPORTIVO





Cuello y mentón



Líneas orbiculares



Surcos nasogenianos

## Tratamientos faciales

En tratamientos faciales, la resistencia que ofrecen los tejidos al paso de corriente, provoca el incremento controlado de la temperatura tisular en dermis, dejando intacta la epidermis. Este aumento endotérmico conlleva una doble consecuencia:

Activación inmediata de la circulación sanguínea	<b>Recepción de principios activos de <i>Supreme Cell</i> y accionado de la neogénesis celular</b>
Contracción de las fibras de colágeno	Efecto inmediato: <b>tensado de fibras de colágeno del tejido subcutáneo</b> Efecto progresivo: <b>formación de nuevas fibras elásticas</b>

RECONSTRUCCIÓN DE LA RED BIO-REDENSIFICADORA DE SUJECIÓN DÉRMICA

Reafirmación, remodelación de óvalo, mejora del tono elástico general, mejora de líneas de expresión

## Tratamientos corporales

El poder activador de la radiofrecuencia induce la proliferación de fibroblastos dérmicos y mejora el sistema arteriovenoso de los tejidos, mejorando notablemente la flacidez en zonas difíciles como cara interna de muslos y brazos.

Con el sistema Mesobiolift aplicamos radiofrecuencia de 1Mhz y mesoterapia virtual en un solo gesto, penetrando principios activos vegetales que incrementan los resultados de nuestros tratamientos.

### TRATAMIENTO REAFIRMANTE

Revitalización y regeneración cutánea.

### TRATAMIENTO DESCONGESTIVO

Reactivación de irrigación sanguínea.



Glúteos



Abdomen



Brazos

## TRATAMIENTOS FACIALES & CORPORALES

# Mesobiolift RF



## Emulsiones conductoras RÖS'S para señal endo-térmica

La onda endo-térmica por sí misma estimula la regeneración celular, pero además el intercambio iónico que provoca, favorece la permeabilidad de su membrana, lo que hace que la introducción de principios activos sea mucho más fácil.

RÖS'S presenta una gama de emulsiones para señal endo-térmica enriquecidas con los principios activos vegetales encapsulados en liposomas. Se facilita así su penetración y por tanto el aumento de su eficacia.



**Emulsión reafirmante RF**  
Emulsión enriquecida con *cola de caballo, extracto de lúpulo, hiedra, hamamelis y colágeno*, un compuesto vegetal para tratar eficazmente la pérdida de elasticidad de la piel, fortalecer el tejido conjuntivo y favorecer el drenaje de los tejidos.

### Emulsión descongestiva IM

Emulsión enriquecida con *menthol y calmosensine*. El menthol es un concentrado extraído a partir de especies de la menta con acción antiinflamatoria, antiséptica y vasoconstrictora. El calmosensine es un péptido calmante que favorece la relajación.

### Supreme CELL

Emulsión enriquecida con células madre extraídas del núcleo del argán, reconocido regenerador. Activa la neogénesis de las células de la piel, ayudando en la reconstrucción de la red que sujeta nuestro tejido cutáneo. Óptimo para pieles desvitalizadas por la carencia de nutrientes o con signos de envejecimiento.



Selección de programas según las necesidades de la piel de cada persona. Intensidad regulable.





**Corrige la flacidez dérmica facial y corporal.**

**Difumina líneas orbitales y atenúa bolsas.**

**Suaviza líneas de expresión.**



## CUIDADOS ANTIAGING CON RADIOFRECUENCIA

**My Sekret** emite radiofrecuencia a 3MHz, un potente generador de calor con aplicaciones para tratamientos de reafirmación cutánea facial y corporal.

### ¿Cómo funciona My Sekret?

La radiofrecuencia estética consiste en la aplicación de energía electromagnética con el fin de provocar el calentamiento controlado de las diferentes capas de la dermis. Este incremento de la temperatura se produce debido a la resistencia que ofrecen los tejidos al paso de la corriente. Su aplicación favorece la formación de nuevo colágeno y elastina, así como una mejora en la circulación del área tratada.

### Aplicación facial

Con el paso del tiempo, la renovación celular de los tejidos se ralentiza y la piel pierde elasticidad debido a que las fibras encargadas de su recuperación, colágeno y elastina entre otros, se debilitan. La piel se vuelve más fina y tienden a aparecer pliegues. La última tecnología en radiofrecuencia tiene como objetivo prevenir y recuperar la tersura y reafirmación cutánea aumentando el metabolismo celular y regenerando nuevas fibras elásticas.

- | Mejora del tono elástico de la dermis.
- | Estimulación de la producción de colágeno.

### Aplicación corporal

Diversos factores endocrinos, genéticos, hormonales o neurovegetativos favorecen la aparición de trastornos como la flacidez. Con la radiofrecuencia apreciamos una mejora gradual en la calidad de la piel, que se muestra más tersa y firme.

- | Aporte de nutrientes y oxígeno.
- | Mejora del drenaje linfático para la eliminación de sustancias de desecho.

### Parámetros personalizables en pantalla táctil.

- | Tiempo de aplicación.
- | Cabezal de aplicación: corporal o facial.

# My Sekret

### TRATAMIENTOS

- ANTICELULÍTICO
- REMODELANTE
- TONIFICANTE
- ACTIVADOR CIRCULATORIO
- REDUCTOR
- DESCONTRACTURANTE
- MASAJE DEPORTIVO



Aplicador resistivo bipolar coaxial con cabezal facial y corporal intercambiables.



# Complet

## CUIDADO PROFESIONAL PARA LA PIEL

**Complet** es el equipo multifuncional perfecto para los tratamientos faciales imprescindibles en el salón de belleza. Sus diversas funciones se pueden combinar en multitud de protocolos de cabina.

Sea cual sea el tipo de piel, **Complet** dispone de la solución adecuada para la limpieza y tratamiento facial.

Nunca has tenido tantas posibilidades en tan poco espacio. Útil, práctico y versátil.

### Funciones Complet

- I Aspiración:** ventosa de succión. Piel limpia. Dos tipos de ventosas, redonda y plana, que se adaptan a cada necesidad.
- I Desincrustación:** limpieza profunda mediante corriente galvánica para tratamientos en pieles grasas u oleosas. Regula la secreción sebácea. Piel limpia y oxigenada.
- I Revitalización facial mediante micro-estimulación:** emisión de micro-corrientes activadoras de la circulación para favorecer la oxigenación de los tejidos.
- I Pulverización:** microdifusión de tónicos para tratamiento. Piel hidratada y tonificada.
- I Alta frecuencia directa o indirecta:** relajante o mecánica excitante. Penetración de producto gracias al efecto térmico. Piel limpia y des congestionada. Cuatro electrodos distintos.
- I Brossage:** cepillo limpiador de impurezas y grasas acumuladas mediante loción jabonosa. Piel limpia y cuidada. Cuatro tipos de cepillo.
- I Ionización:** introducción de sustancias cosméticas ionizables a través de la piel. Dos electrodos-rodillo.
- I Electrolifting:** emisión de microcorrientes que actúan a nivel de las miofibrillas musculares, para prevenir la aparición de flaccidez y líneas de expresión.

### TRATAMIENTOS

- PULVERIZACIÓN
- ALTA FRECUENCIA DIRECTA
- ALTA FRECUENCIA INDIRECTA
- BROSSAGE
- ASPIRACIÓN
- IONIZACIÓN
- DESINCRUSTACIÓN
- ELECTROLIFTING
- MICRO-ESTIMULACIÓN
- IONIZACIÓN+ESTIMULACIÓN



Pulverización, alta frecuencia y electrolifting



BROSSAGE



IONIZACIÓN





### TECNOLOGÍA: DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA

#### 1. Potencia

- | Modelo de alta potencia de 2000W con 10 barras de diodo.
- | Capacidad para actuar en 5HZ a máxima potencia. Hasta 60J/cm<sup>2</sup> en modos auto, 30ms, 100ms y 400ms.

#### 2. Velocidad

- | Ahorro de tiempo y gran rentabilidad gracias al Modo barrido SP, que trabaja a alta velocidad.
- | Spot de 1cm<sup>2</sup>.

#### 3. Funcionalidad

- | Ergonomía del aplicador.
- | Pantalla táctil.
- | Software intuitivo.

#### 4. Seguridad

- | Sistema de refrigeración por frío continuo de 0° el spot. Facilita la aplicación sedando la zona tratada y nos permite trabajar a temperaturas de hasta 28° en cabina. Preserva la comodidad del paciente con su sistema de refrigeración gracias al cobre cromo-duro de la puntera con alta capacidad de absorción de calorías, debido a su alta conductividad térmica.
- | Sistema de refrigeración interior del diodo. Temperatura constante entre 12-14°.
- | Disparo accionado en aplicador o por pedal.
- | Llave de seguridad y botón de emergencia.

## EL LÁSER DIODO MÁS POTENTE Y RÁPIDO DE SU CATEGORÍA

La tecnología LASER más funcional, rápida y potente en su categoría. Utiliza la combinación de parámetros técnicos más adecuados para ofrecer una herramienta práctica, segura y eficiente a los profesionales de la depilación.

Diseñado y fabricado íntegramente en España, utiliza componentes de la máxima calidad.

#### Eficacia

| **DIODO 2000/5 utiliza es una fototermólisis selectiva**, utiliza la energía de la luz para dañar irreversiblemente la mayor parte de células responsables del crecimiento del vello sin dañar estructuras circundantes. La melanina del vello absorbe y canaliza el calor hasta el folículo piloso, elevando la temperatura hasta 70°C e inhibiendo el crecimiento de nuevo vello de forma permanente. Este efecto se consigue de forma segura gracias al diseño de sus pulsos que le dotan de control sobre la energía.

| **Cuatro modos de trabajo**, pulsado de 30ms, 100ms o 400ms y modo arrastre para trabajar todo tipo de vello con eficacia independientemente del fototipo de piel.

#### Rentabilidad

- | **Reducción de tiempo** en los tratamientos hasta un 50% gracias a su modo SP.
- | Utiliza el poder de la luz de manera inteligente y selectiva adaptándose a todos los fototipos de piel, densidad, color y grosor de vello sin perder efectividad.
- | Utilizable durante cualquier época del año.
- | Sin gastos de mantenimiento. Durabilidad del diodo hasta 12 millones de disparos.

**Elimina el vello facial y corporal de forma permanente, disminuye la foliculitis y mejora la calidad de la piel.**

**Eficaz con todo tipo de densidad de vello o fototipo de piel.**

## DEPILACIÓN LÁSER DIODO 2000/5



#### TRATAMIENTOS

- ELIMINACIÓN DE VELLO NO DESEADO
- DISMINUCIÓN DE LA FOLICULITIS
- MEJORA DE LA CALIDAD DE PIEL



Disparo accionado en aplicador o por pedal.

# Depilplus 3

ELIMINACIÓN DEFINITIVA DE TODO TIPO DE VELLO NO DESEADO.



## DEPILACIÓN ELÉCTRICA TRES EN UNO


La depilación eléctrica es la única técnica que garantiza la eliminación de todo tipo de vello no deseado independientemente de su color, grosor o ubicación. Su tecnología trabaja con emisiones controladas de corriente galvánica y alta frecuencia. Se recomienda su uso en áreas localizadas, para la eliminación del vello residual resistente a la fotodepilación o en los casos en los que no es posible el uso de la depilación tradicional.

**DEPILPLUS 3** es el equipo de electro-estética que incorpora las tres técnicas más efectivas en depilación eléctrica: termólisis, electrólisis y la combinación de ambas (sistema blend).

Parámetros personalizables que nos permiten adaptar la aplicación según el tipo de vello.

- | Tipo de técnica
- | Tiempo
- | Grado de potencia

Técnica	Emisión	Acción	Elección de técnica
<b>Electrólisis</b>	Corriente galvánica	Destrucción de la papila dérmica por quemadura química (alcalina). Se requiere electrodo de retorno.	Grado alto de eficacia y nivel medio de inflamación post-tratamiento.
<b>Termólisis</b>	Alta-frecuencia	Destrucción de la papila dérmica por acción térmica.	Grado alto de eficacia y bajo nivel de inflamación.
<b>Sistema blend</b>	Galvánica + Alta-frecuencia	Acción combinada de electrólisis y termólisis. Se requiere electrodo de retorno.	Grado muy alto de eficacia y nivel alto de inflamación.

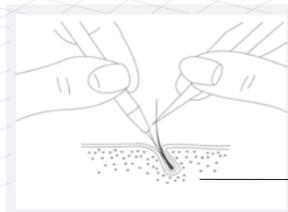

La energía se canaliza mediante un filamento que se introduce a través del poro hasta alcanzar la papila dérmica, sobre la que se aplica la descarga eléctrica. Este proceso daña irreversiblemente las células germinales, eliminando así la posibilidad de nacimiento de un nuevo vello.



Pantalla táctil.  
Control de emisión mediante pedal.

# Depilplus 13 MHz

## DEPILACIÓN ELÉCTRICA A LA CARTA

**Depilplus 13MHz** es el equipo de electro-estética que ofrece las técnicas más efectivas en depilación eléctrica al profesional de la belleza. Prepara la piel y elimina de manera permanente de vello no deseado en áreas localizadas o vello resistente a la fotodepilación.

### Especificaciones Técnicas

- | **Depilplus 13MHz** dispone de programas pre-diseñados y posibilidad de personalizarlos en tipo de emisión, intensidad y tiempo.
- | Emisión de aire ozonizado seco en el porta-agujas de efecto bactericida y sedante.
- | Regulador de potencia y temporizador.
- | Control de emisión mediante pedal.



### TRATAMIENTOS

- ELIMINACIÓN DEFINITIVA DE VELLO NO DESEADO

Técnica	Corriente	Acción	Beneficio
<b>Electrólisis</b>	Galvánica	Química	Gran efectividad
<b>Termólisis</b> Soft-termólisis Flash	Radio-frecuencia Potencia mínima Potencia máxima	Térmica	Mucha rapidez Zonas de sensibilidad media Zonas de sensibilidad alta
<b>Blend</b>	Galvánica + Radio-frecuencia	Química + térmica	Efectividad máxima
<b>Sonda térmica</b>	Calor	Térmica	Penetración de producto
<b>Sonda Anaforesis</b>	Galvánica	Efecto vasodilatador	Facilita la canalización
<b>Sonda cataforesis post-depilación</b>	Galvánica	Neutralizante	Regula el PH de la piel



# R | GELES EMULSIONES

Línea de emulsiones y geles conductores enriquecidos con principios activos naturales.

**ELECTRO  
GEL**  
REAFIRMANTE



**Gel conductor enriquecido con principios activos reafirmantes**

Recomendado para Kestos T2, TEI System y Complet  
Ref. 660071P · 1000ml

**ELECTRO  
GEL**  
DRENANTE  
ANTICELULÍTICO



**Gel conductor enriquecido con principios activos drenantes y anticelulíticos**

Recomendado para Kestos T2 y TEI System  
Ref. 660070P · 1000ml

**TERMO  
ACTION**  
SYSTEM



**Emulsión Termoactiva**

Recomendado para Rollaction  
Ref. 660080P · 1000ml

**LIPO  
dren**



**Aceite seco**

Recomendado para Rollaction  
Ref. 660085P · 500ml

**GEL**  
IPL/US  
CAVITACIÓN



**Gel para tratamientos con luz pulsada, láser y ultrasonidos**

Recomendado para US1 y Dido  
Ref. 6600051 · 1000ml  
Ref. 6600050 · 5000ml

**Emulsión  
RF**  
SYSTEM



**Emulsión conductora neutra para RF**

Recomendado para Mesobiolift y My Sekret  
Ref. 660095P · 1000ml

**Emulsión  
RF**  
REAFIRMANTE



**Emulsión conductora de onda endo-térmica con principios activos reafirmantes**

Recomendado para Mesobiolift RF  
Ref. 660110P · 1000ml

**Emulsión  
IM**  
DESCONGESTIVA



**Emulsión conductora de onda endo-térmica con principios activos descongestivos**

Recomendado para Mesobiolift RF  
Ref. 660100P · 1000ml

**Supreme  
Cell**



**Emulsión conductora RF enriquecida con células madre**

Recomendado para Mesobiolift RF  
Ref. 660092P · 500ml

**Emulsión  
RF**  
BIENERGY



**Emulsión conductora para tratamientos capacitivos y resistivos**

Recomendado para Binare Premium  
Ref. 660200P · 500ml

**Electro  
GEL**  
BIENERGY



**Gel conductor para electro-estimulación estética**

Recomendado para Binare Premium  
Ref. 660210P · 1000ml

Nuestros geles alargan la vida útil de tu aparatología estética, ya que han pasado los test de laboratorio que aseguran el cuidado de las sondas y aplicadores de energía.

Nuestro embase con dispensador incorporado es perfecto para utilizar tanto en tratamientos faciales, como corporales.

## DATOS TÉCNICOS

### Rollaction System REF.0028460

DIMENSIONES	Ancho	490 mm
	Alto	950 mm
	Fondo	380 mm

PESO	19 kg
PIE BETA REF. 0077220 (Incluido)	790x450 mm
CONSUMO	115 W
LUZ IR	850 nm
VELOCIDAD MAX	140 rpm

CÓDIGO	ACCESORIOS	CANTIDAD
04RA011	Aplicador ROLL 16mm	1
04RA012	Aplicador ROLL 21mm	1
04RA013	Aplicador ROLL 30mm	1
04RA014	Aplicador ROLL 45mm	1
6600080	Emulsión Termo-activa (1000ml)	1



### TEI System REF.0080000

DIMENSIONES	Ancho	490 mm
	Alto	1.000 mm
	Fondo	490 mm

PESO	34 kg
CONSUMO	290 W

CÓDIGO	ACCESORIOS	CANTIDAD
24TE235	Bandas térmicas de 580x190mm 35 W	2
24TE125	Bandas térmicas de 240x260mm 25 W	4
24TE115	Bandas térmicas de 240x170mm 15 W	4
24TE104	Bandas térmicas de 180x67mm 4 W	2
33TE114	Cables de bandas	10
0400800	Bandas elásticas de 100cm	4
0401000	Bandas elásticas de 60cm	6
0401100	Bandas elásticas de 40cm	6
30T0110	Colgador bandas	1
6600071	Electrogel reafirmante 1.000 ml	1
6600070	Electrogel drenante 1.000 ml	1

KIT DE CORTESÍA		
24TE235	Banda térmica de 580x190mm 35 W	1
24TE125	Banda térmica de 240x260mm 25 W	1
24TE115	Banda térmica de 240x170mm 15 W	1
24TE104	Banda térmica de 180x67mm 4 W	1
33TE114	Cable de bandas	1



### Kestos T2 REF.0028510

DIMENSIONES	Ancho	590 mm
	Alto sin pie	180 mm
	Fondo	280 mm

PESO	10 kg
PIE BETA REF. 0077220 (Optativo)	790x450 mm
CONSUMO	300 W

CÓDIGO	ACCESORIOS	CANTIDAD
24TE235	Bandas térmicas 35W	2
24TE125	Bandas térmicas 25W	4
0400800	Bandas elásticas de 100cm	4
0400900	Bandas elásticas de 80cm	4
0401000	Bandas elásticas de 60cm	4
0401100	Bandas elásticas de 40cm	4
33TE114	Cables bandas	6
6600071	Electrogel reafirmante 1.000 ml	1
6600070	Electrogel drenante 1.000 ml	1
30T0110	Colgador bandas	1

KIT DE CORTESÍA		
24TE235	Banda térmica 35 W	1
24TE125	Banda térmica 25 W	1
33TE114	Cable de bandas	1



### Press G3 REF.0028500

DIMENSIONES	Ancho	590 mm
	Alto sin pie	180 mm
	Fondo	280 mm

PESO	9 kg
PIE BETA REF. 0077220 (Optativo)	790x450 mm
CONSUMO	100 W

CÓDIGO	ACCESORIOS	CANTIDAD
0406700	Abdomen	1
0406710	Pernera derecha	1
0406711	Pernera izquierda	1
0406720	Pie derecho	1
0406721	Pie izquierdo	1
0406730	Brazo derecho	1
0406731	Brazo izquierdo	1
0406740	Manguera	1
04EP013	Pantalón desechable	5



### US1 REF.0028490

DIMENSIONES	Ancho	310 mm
	Alto	350 mm
	Fondo	180 mm

PESO	2,5 kg
FRECUENCIA	1MHz
POTENCIA	0,5 - 1,8W
MODO	Pulsado y continuo
CONSUMO MEDIO	90W

CÓDIGO	ACCESORIOS	CANTIDAD
0403992	Sonda 1-C180	1
0403998	Sonda 2-C270	1
6600051	Gel conductor 1.000ml	1



### Mesobiolift RF REF.0028480

DIMENSIONES	Ancho	590 mm
	Alto sin pie	112 mm
	Fondo	560 mm

PESO	19 kg
PIE BETA REF. 0077220 (Optativo)	790x450 mm
FRECUENCIA	1/3MHz
MODO	Continuo
POTENCIA APLICADOR	40 W

CÓDIGO	ACCESORIOS	CANTIDAD
04RF000	Aplicador específico	1
04RF010	Aplicador facial	1
04RF020	Aplicador corporal	1
0401700	Pedal Din-5 rosca	1
6600092	SUPREME Cell 500ml	1
6600110	Emulsión Reafirmante RF 1.000ml	1
6600100	Emulsión Descongestiva IM 1.000ml	1



### My Sekret REF.0710000

DIMENSIONES	Ancho	310 mm
	Alto	350 mm
	Fondo	180 mm

PESO	2,5 kg
FRECUENCIA	3MHz
POTENCIA	30W
MODO	Continuo
CONSUMO MEDIO	90W

CÓDIGO	ACCESORIOS	CANTIDAD
40SK120	Electrodo externo corporal	1
40SK110	Electrodo externo facial	1
6600095	Emulsión RF 1.000ml	1



**Binary Premium** REF.0089020

DIMENSIONES	Ancho	1240 mm
	Alto	360 mm
	Fondo	570 mm
PESO		42,2 kg
FRECUENCIA DIATERMIA		448KHz
POTENCIA DIATERMIA CAPACITIVA		450VA
POTENCIA DIATERMIA RESISTIVA		200W
FRECUENCIA ELECTROLIFTING		2KHz
POTENCIA ELECTROLIFTING		60V
FRECUENCIA ELECTROLIPOLISIS		18Hz
POTENCIA ELECTROLIPOLISIS		60V
FRECUENCIA ELECTROREAFIRMACIÓN		100Hz
POTENCIA ELECTROREAFIRMACIÓN		64V
CONSUMO MEDIO		350W

CÓDIGO	ACCESORIOS	CANTIDAD
04BI000	Aplicador electrolifting	2
33B0000	Cable electrolifting	1
04BI060	Banda estimulación 58cm	4
04BI085	Banda estimulación 74cm	2
33R001A	Cable estimulación A	1
33R001B	Cable estimulación B	1
33R001C	Cable estimulación C	1
04BI140	Banda elástica 40cm	4
04BI160	Banda elástica 60cm	4
04BI100	Banda elástica 100cm	2
04BPRF6	Mango capacitivo acodado	1
04BPRF8	Mango resistivo acodado	1
04B1C30	Electrodo capacitivo 30mm	1
04B1C50	Electrodo capacitivo 50mm	1
04B1C70	Electrodo capacitivo 70mm	1
04B1R30	Electrodo resistivo 30mm	1
04B1R50	Electrodo resistivo 50mm	1
04B1R70	Electrodo resistivo 70mm	1
04B0001	Placa retorno	1
04R0010	Lápiz pantalla capacitiva	1
99B0000	Cuenco cristal 0.07l 7.5X3.2cm	1
0401330	Electrodos autoadhesivos	28
6600200	Bi energy RF 1.000ml	1
6600210	Bi energy ELECTRO 1.000ml	1



**Termobeauty** REF.0089040

DIMENSIONES	Ancho	225 mm
	Alto	330 mm
	Fondo	535 mm
PESO		10,5 kg
CONSUMO		350 W
FRECUENCIA DIATERMIA RESISTIVA		448 kHz
FRECUENCIA DIATERMIA CAPACITIVA		448 kHz
POTENCIA DIATERMIA RESISTIVA		200 W
POTENCIA DIATERMIA CAPACITIVA		450 VA

CÓDIGO	ACCESORIOS	CANTIDAD
04BPRF6	Aplicador RF capacitivo acodado	1
04BPRF8	Aplicador RF resistivo acodado	1
4B1R30	Electrodo resistivo 30 mm.	1
04B1R50	Electrodo resistivo 50 mm.	1
04B1R70	Electrodo resistivo 70 mm.	1
04B1C30	Electrodo capacitivo 30 mm.	1
04B1C50	Electrodo capacitivo 50 mm.	1
04B1C70	Electrodo capacitivo 70 mm.	1
04B0001	Placa retorno metalica V2	1



**Diodo 2000/5** REF.0001100

DIMENSIONES	Ancho	440 mm
	Alto	880 mm
	Fondo	530 mm
PESO		48 kg
FRECUENCIA DE PULSO (MODO PULSADO)		1-2-3-4 Hz/s
FRECUENCIA DE PULSO (MODO SP)		10 Hz/s
LONGITUD DE ONDA		810nm
ANCHO DE PULSO		2 A 400 MS
POTENCIA MÁXIMA		2.000W
FLUENCIA		40 J/cm2, 30 ms 60 J/cm2, 400 ms
TAMAÑO SPOT		10X10mm
CABLE ELÉCTRICO		1.4m
CABLE PEDAL		1.8m



**Complet** REF.0028100

DIMENSIONES	Ancho	490 mm
	Alto sin pie	180 mm
	Fondo	280 mm
PESO		5,75 kg
PIE BETA REF. 0077220 (Optativo)		790x450 mm
CONSUMO		69 mw

CÓDIGO	ACCESORIOS	CANTIDAD
<b>ALTA FRECUENCIA</b>		
040300*	Mango porta electrodos	1
3700700	Electrodo cuello	1
3700500	Electrodo facial	1
3700600	Electrodo lápiz	1
3701000	Electrodo tratamiento indirecto	1
<b>LIFTING</b>		
0405901	Electrodos con mango	2
4000700	Electrodo metálico	1
3400400	Electrodo desincrustación	1
0402101	Rodillos	2
0401320	Bolsas x 30 Electrodo desechables	2
3306031	Cable rojo - negro	1
33COM11	Cable múltiple 5 rojos 5 negros	1
6600071	Electrogel reafirmante (1000ml)	1
<b>SPRAY/ASPIRACIÓN</b>		
3400900	Tubos silicona 5 x 8 x 1500 mm	2
3701600	Ventosa redonda	1
040270*	Botellas atomizadoras	2
3701700	Ventosa plana	1
3402600	Tapón negro ventosa	2
<b>BROTRES</b>		
040051*	Mango porta - cepillos	1
040010*	Cepillo Ø 20 mm nylon	1
040030*	Cepillo Ø 40 mm nylon	1
040020*	Cepillo Ø 40 mm nylon	1
040040*	Cepillo Ø 55 mm nylon	1



**Depilplus 13 MHz** REF.0028600

DIMENSIONES	Ancho	490 mm
	Alto sin pie	180 mm
	Fondo	280 mm
PESO		5 kg
PIE BETA REF. 0077220 (Optativo)		790x450 mm
CONSUMO		450mA
FRECUENCIA		50 Hz
POTENCIA		105W

CÓDIGO	ACCESORIOS	CANTIDAD
0401700	Pedal DIN	1
040181*	Porta-agujas	1
040182*	Sonda calor	1
0407301	Caja aguja recta inox. 50 und.	1
0407300	Caja aguja curva inox. 50 und.	1
3306140	Cable de retorno negro	1
4006909	Electrodo de retorno	1



**Depilplus 3** REF.0028610

DIMENSIONES	Ancho	310 mm
	Alto	350 mm
	Fondo	180 mm
PESO		2,5 kg
CONSUMO		450 mA
FRECUENCIA		50 Hz
POTENCIA		105 W

CÓDIGO	ACCESORIOS	CANTIDAD
0401700	Pedal DIN	1
040181*	Porta-agujas	1
0407301	Caja aguja recta inox. 50 und.	1
0407300	Caja aguja curva inox. 50 und.	1
3306140	Cable de retorno negro	1
4006909	Electrodo de retorno	1



## NUESTRA GUÍA DE TÉCNICAS

RÖS'S pone a disposición de los expertos en salud y belleza las herramientas tecnológicas más acertadas para cada tratamiento. Algunas de ellas, convertidas hoy día en clásicos; otras, lo último en desarrollo técnico. Sea cual sea la necesidad de su centro de belleza o su cabina estética, le ofrecemos la solución idónea para obtener los mejores resultados.

**¡Escoja aquella con la que se sienta más cómodo!**

TÉCNICAS CORPORALES	ENERGÍA	APLICADOR	BENEFICIOS PRINCIPALES	EQUIPO RÖS'S
TERMO-ESTIMULACIÓN	Termoterapia+electroestimulación	Bandas de termo-estimulación	Reducción, reafirmación, remodelación	<b>TEI System, Kestos T2</b>
ULTRASONIDOS	Ultrasonidos	Sondas de 1MHz o 3MHz	Anticelulítico, reducción	<b>US1</b>
SONOFORESIS	Ultrasonidos	Sonda de 1MHz	Penetración activos cosméticos	<b>US1</b>
MASAJE FISIOACTIVO	Masaje de compresión	Rollers	Reducción, anticelulítico, remodelación	<b>Rollaction System</b>
PRESOTERAPIA	Masaje neumático	Accesorio de pantalón, abdomen y brazos	Drenante circulatorio	<b>Press G3</b>
ELECTRÓLISIS, TERMÓLISIS, BLEND	Depilación eléctrica	Aguja	Depilación eléctrica	<b>Depilplus 13MHz, Depilplus 3</b>
RADIOFRECUENCIA	Radiofrecuencia	Electrodo corporal	Reafirmación cutánea	<b>Mesobiolift RF, My Sekret</b>
ONDA ENDOTÉRMICA	Corriente continua + radiofrecuencia	Electrodo corporal	Reafirmación y descongestión	<b>Mesobiolift RF</b>
DIATERMIA	Radiofrecuencia capacitiva y resistiva	Electrodos corporales	Regeneración celular	<b>Binary Premium TermoBeauty</b>
ELECTRO-ESTIMULACIÓN	Corrientes	Bandas	Reafirmación y lipólisis	<b>Binary Premium, TEI, Kestos T2</b>

TÉCNICAS FACIALES	ENERGÍA	APLICADOR	BENEFICIOS PRINCIPALES	EQUIPO RÖS'S
BROSSAGE	Cepillado mecánico	Cepillos	Limpieza cutánea	<b>Complet</b>
ALTA FRECUENCIA	Corriente alterna	Electrodo (directo/indirecto)	Descongestivo, bactericida	<b>Complet</b>
DESINCRUSTACIÓN	Corriente galvánica	Electrodo de caucho	Limpieza profunda	<b>Complet</b>
IONIZACIÓN	Corriente galvánica	Electrodos o rodillos	Penetración producto cosmético ionizable	<b>Complet, Mesobiolift RF</b>
ELECTROLIFTING	Micro-corrientes variables	Electrodos	Reafirmación muscular y tisular, efecto lifting	<b>Complet, Binary Premium</b>
ONDA ENDOTÉRMICA	Corriente continua +radiofrecuencia	Electrodo facial o específico	Reafirmación y redensificación cutánea	<b>Mesobiolift RF</b>
DIATERMIA	Radiofrecuencia capacitiva y resistiva	Electrodos faciales	Regeneración celular	<b>Binary Premium TermoBeauty</b>



RÖS'S ESTÉTICA S.L.  
REGISTERED TO ISO 9001:2008  
FILE NUMBER: A15718

**RÖS'S**  
Tecnología estética

**RÖS'S, Estética S.L.** Molinot, 46-48 · Pol. Camí Ral · 08860 CASTELLDEFELS · BARCELONA (SPAIN)  
TEL. (34) 93 426 60 17 FAX. (34) 93 426 27 62 e-mail: [ross@ross.es](mailto:ross@ross.es) · [www.ross.es](http://www.ross.es)